

ミムロツイン型そけいベルト（脱腸帯）

商品コード： 601

関連カテゴリ> ベルト（ストーマ関連）

お悩みから探す > そけいヘルニアをお持ちの方に（脱腸）

¥ 7,800 税抜

選択してください

数量

1

カートに入れる

お気に入りに追加

特徴

- ベルト素材に旭化成テクノファイン糸を使用しているため吸水速乾性に優れており蒸れを抑えます
- ベルト表面にマジックパイルゴムを使用しているため自由にサイズ調整ができます
- バックル部分は取り外し移動できるため調節が可能です

ご使用方法

1. ベルトは組み立てた状態で納品させていただいております
下着をはくように身につけ、太ベルトをウエスト位置で締めてください
2. 細ベルトがヘルニア部の上になるようにバックルを移動させてください
3. 仰向けに寝た状態でヘルニア部を落ち着かせ、ご自身に合ったスポンジの数に調節しパッドを細ベルトの裏側に装着してください（スポンジは3枚まで挿入可能）
4. ヘルニアがパッドできちんと押さえられているかご確認ください
5. 最後に立ち上がり、補助ベルトを巻いてパッドの上を押さえます

仕様

	601	
製品タイプ	標準	
ベルト巾	太ベルト10cm / 補助ベルト7.8cm	
サイズ	S	M
太ベルト長さ	85cm	100cm
胴回り適応範囲	60～80cm	75～100cm
補助ベルト長さ	90cm	105cm
胴回り適応範囲	～105cm	～125cm
カラー	ベージュ	
品質	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン	
スポンジ	8cm×6cm（7mm厚）5枚・袋2枚付き	
スポンジカバー	アイボリー	
価格	7,800円（税別）	
オーダーメイド (納期約3週間)	別途お見積もり致します	

→オーダーメイドはこちら

患者さまが直接当社に来社していただくと、希望に添えたベルトをお作りできます。写真にて詳しく記入していただいたものを、お送りしていただいても結構です。納期は約3週間いただいておりますが、遅くなる場合もございます。

カタログダウンロード

→商品カタログ（PDF）



マウスオーバーすると詳細まで確認できます。