


ミムロ オーガニック ワンタッチベルト

皮膚と装具の密着性を高め
面板が密着しにくい方や外出時に最適です。



特長


- ・タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応
- ・両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能
- ・両側からサイズ調整ができるため左右の張力が均一になる
- ・フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られる
- ・肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（*パイル織り）のため肌あたりが優しい
- ・マジックの開閉部分につまみがあるため楽に開閉できる

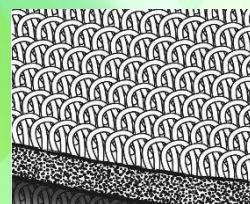


*パイル織り

装着方法


- ①クリップの根元の部分のみを
左手で持ち右手で
クリップの頭を下に押します。

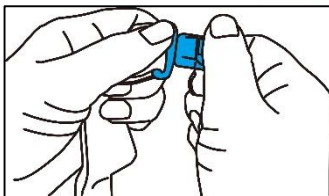


- ②右手で下に押しますと
図のように根元で折れた
状態になります。

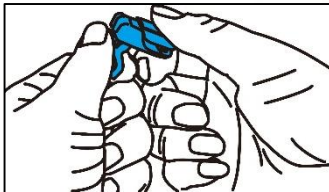


- ③右手を放すと鱗ぐちが開きます。

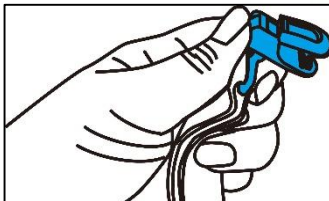

- ④タブの穴に鱗ぐち部分を
合わせて上下から押えこんで
下さい。
引っ張って外れないか確認
して下さい。

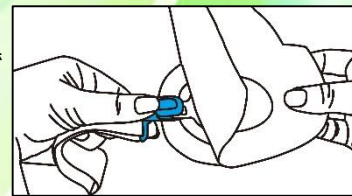

- 【ベルト調整】
⑤閉じた状態のクリップを
持ちもう一方の手でベルト
を胸周りに合わせて
調整して下さい。

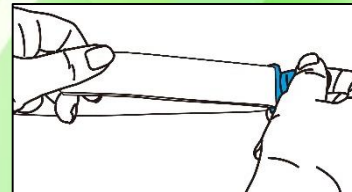

- 【洗濯方法】
・液温は40℃を限度とし、手洗い(押し洗い)をして下さい。
・塩素系及び酸素系漂白剤、アイロンの使用は避けて下さい。
・洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

【使用上の注意】

- ・ご使用中、圧迫により気分が悪くなったときなどは速やかに使用を中止し、医師または看護師にご相談下さい。
- ・ご使用中またはご使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師、看護師にご相談下さい。

品番	仕様	ベルト幅	ベルト長さ	カラー	品質	価格
OG307B		3 cm	90cm	ベージュ	綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステルレーヨン・ポリウレタン	1,200円(税別)



製造元



株式会社



販売代理店

〒130-0023 東京都墨田区立川1-16-17 タテカワ116 1F
TEL 03-3633-5260 FAX 03-3633-4508
<http://www.stoma-belt.jp> E-mail: info@mimuro.jp