


ミムロ オーガニック フック式ワンタッチベルト

皮膚と装具の密着性を高め
面板が密着しにくい方や外出時に最適です。



特長


- ・フック部分が青でマーキングされているので引っ掛けやすい
- ・タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応
- ・両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能
- ・両側からサイズ調整ができるため左右の張力が均一になる
- ・フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られる
- ・肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（*パイル織り）のため肌あたりが優しい

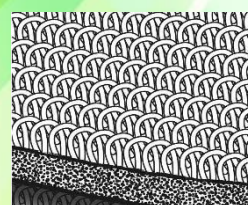


*パイル織り

装着方法

- ①フックの青い部分を
上にして持ち、タブの穴の下から
引っ掛けてください。

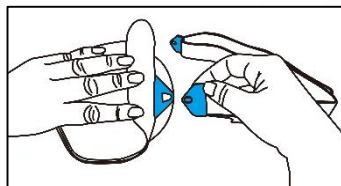


- ②しっかり引っ張り、フックが
外れないか確認してください。

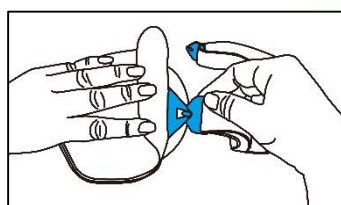

【ベルト調整】

- ③フックを持ちもう一方の手で
ベルトを胴回りに合わせて
調整して下さい。

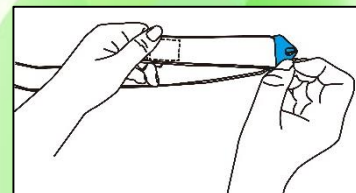

【使用上の注意】

- ・ご使用中、圧迫により気分が悪くなったときなどは速やかに使用を中止し、医師または看護師にご相談下さい。
- ・ご使用中またはご使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師、看護師にご相談下さい。

【洗濯方法】

- ・液温は40℃を限度とし、手洗い(押し洗い)をして下さい。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤、アイロンの使用は避けて下さい。
- ・洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

品番	仕様	ベルト幅	ベルト長さ	カラー	品質	価格
OG309B		3 cm	90cm	ベージュ	綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン	1,200円(税別)



4 580454 853583

製造元



株式会社

ミムロ

販売代理店

〒130-0023 東京都墨田区立川1-16-17 タテカワ116 1F
TEL 03-3633-5260 FAX 03-3633-4508
<http://www.stoma-belt.jp> E-mail: info@mimuro.jp